

Dusch-und Waschliege

B A R A M E D S T A N D A R D

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir möchten uns zunächst für ihre Entscheidung zur Wahl unseres Produkts und ihrem uns damit entgegengebrachten Vertrauen bedanken

Die Dusch-und Waschliege „bamed Standard“ wurde konzipiert, um Menschen mit Geh-und Stehunsfähigkeit sowie erheblicher Rumpfhaltungsschwäche bei noch erhaltener Funktionsfähigkeit der oberen Extremitäten (z.B. bei Querschnittslähmung im BWS-oder unteren HWS-Bereich, neuromuskuläre Erkrankungen mit entsprechendem Behinderungsbild) und eingeschränktem Bewegungsapparat ein im liegen oder Sitzen noch weitestgehend selbständiges Waschen und Abduschen zu ermöglichen.

Sofern eine derartige Bewegungsunfähigkeit des Körpers besteht, die ein selbständiges Reinigen ausschließen, kann die „bamed Standard“ ebenfalls zum Waschen und Abduschen von hilfebedürftigen Personen durch eine 2. (Pfleger-)Person verwendet werden.

Durch die Konzeption als Aufsatz auf eine vorhandene Badewanne in Standardgröße wird es eingeschränkt beweglichen Personen gezielt ermöglicht, die Dusch-und Waschliege eigenständig sicher zu erreichen und zu benutzen. Die ebene Fläche auf der Badewanne trägt ebenfalls dazu bei, die Badewanne bzw. die Liege auch wieder ohne größere Anstrengung zu verlassen.

Bei der Reinigung von hilfebedürftigen Personen wirkt die erhöhte Liegefläche über dem Badewannenrand entlastend für die Pflegeperson. Gleichzeitig kann die hilfebedürftige Person durch die ebene Liegeposition schnell und bequem bewegt werden, um somit alle Körperstellen für die Körperhygiene oder für weitere pflegerische Maßnahmen (z.B. Eincremen) zu erreichen.

Der bereits in der Standardversion enthaltene Spritzschutz kann mühelos auf die Dusch-und Waschliege aufgesetzt werden. Durch den Spritzschutz wird verhindert, dass Nässe von der Liege nach außen oder an die behandelnde Person gelangt.

Die Lamellen der Auflagen besitzen einen Abstand zueinander, sodass die Abwässer ohne Nässestau durch die Auflage abfließen können. Die Auflagen und die bereits im Modell „Standard“ enthaltene Kopfaufgabe sind selbstverständlich mit wasserundurchlässigem, aber auch fleck-und schmutzabweisendem Textil vernäht. Neben der keimhemmenden Eigenschaft besitzt die Textur darüber hinaus eine Resistenz gegenüber verschiedenen Körperabsonderungen (z.B. Harn, Schweiß) und Desinfektionsmitteln.

Und nebenbei: Duschen kann gegenüber Baden den Wasserverbrauch um bis zu 50% senken.

Allgemeininformation:

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor dem ersten Aufstellen sorgfältig durch und bewahren Sie diese beim Produkt für einen späteren Gebrauch oder für Nachbesitzer auf.

Unser Bestreben ist es, ihr Leben zu vereinfachen.

Ihr Team von TheraMedical

Inhaltsverzeichnis:

1. Gebrauchshinweise	Seite 3
2. Sicherheitshinweise	Seite 3
3. Bedienung	Seite 3 - 5
3.1 Lieferumfang	
3.2 Einsatz und Verwendungsmöglichkeit	
3.2.1 Typ A	
3.2.2 Typ B	
3.2.3 Typ C	
3.3 Montage auf Wannenrand	
3.4 Montage Spritzschutz	
4. Materialien	Seite 5
5. Reinigung und Wartung	Seite 6
6. Technische Daten	Seite 6
7. abschließende Hinweise	Seite 7
7.1 Nutzungsdauer	
7.2 Nutzungsdauer	
7.3 Ersatzteile und Einzelteilbestellung	
7.4 Garantieleistungen	
7.5 Konformitätserklärung	
8. Montageanleitung	Seite 8 - 9

1. Gebrauchshinweise

Verwenden Sie die „baramed“ Dusch-und Waschliege ausschließlich für ihren im Vorwort beschriebenen Zweck. Die Liege darf insbesondere nicht als Ablagefläche für scharfe und spitze Gegenstände benutzt werden (Achtung: Gefahr eines Risses in der Polsterung!)

Die „baramed“ Dusch-und Waschliege wird in drei verschiedenen Standardversionen angeboten und passt somit auf nahezu alle handelsüblichen Badewannen. Die für Ihre Badewanne passenden Größen sind unter Punkt 3.2 näher erläutert. Sollten die Maße Ihrer Wanne von diesen Standardwerten abweichen, kontaktieren Sie uns bitte für eine geeignete Anfertigung.

Bitte öffnen Sie die Verpackung vorsichtig und vermeiden Sie tiefe Einschnitte mit einem scharfen Gegenstand, z.B. Teppich-oder Cuttermesser (Achtung: Gefahr eines Risses in der Polsterung!).

Die Verpackungsmaterialien können recycled werden. Bitte entsorgen Sie die Verpackungen nicht über den Hausmüll, sondern führen Sie diese einer Wiederverwertung zu.

2. Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor Montage sorgfältig durch

- ➔ Das Produkt ist nur für den bestimmungsmäßigen Gebrauch zu verwenden
- ➔ Die Wasch-und Duschliege darf erst in Gebrauch genommen werden, nachdem diese auf dem Wannenrand gemäß Gebrauchsanweisung fixiert worden ist
- ➔ Während einer Verstellung oder Ausrichtung dürfen sich keine Personen oder Gegenstände auf der Liege befinden
- ➔ Für das Maximalgewicht beachten Sie bitte Punkt 6. „Technische Daten“
- ➔ Verpackungsfolien von Kindern fernhalten; es besteht Erstickungsgefahr

3. Bedienung

3.1 Lieferumfang

Die „baramed“ Dusch-und Waschliege wird im Karton komplett montagefertig angeliefert. Im Set sind zusätzlich ein Spritzschutz und eine Kopfstütze enthalten. Die Teilebezeichnung entnehmen Sie bitte Punkt 6. „Technische Daten“.

3.2 Einsatz und Verwendungsmöglichkeit

Die „baramed“ Dusch-und Waschliege wird in unterschiedlichen Größen angeboten:

Typ A = 177 cm Länge x 80 cm Breite

Typ B = 167 cm Länge x 75 cm Breite

Typ C = 167 cm Länge x 70 cm Breite

Die Verwendungsmöglichkeiten und Spezifikationen sind im Folgenden einzeln erläutert:

3.2.1 Typ A

Wannenmaß außen: 180 cm x 80 cm

Bei Einfassung zwischen zwei Mauerwerken:

Innenmaß zwischen den Mauerwerken: mind. 178 cm

Wannenmaß innen: 60 cm bis 70 cm

Auflage Wannenrand: mind. 4 cm

Abstand Wannenoberkante und Unterkante Armaturen/Anbauten

(Mischbatterie, Wanneneinlauf, Badewannengriff, Seifenschale, etc.): mind. 11 cm

3.2.2 Typ B

Wannenmaß außen: 170 cm x 75 cm

Bei Einfassung zwischen zwei Mauerwerken:

Innenmaß zwischen den Mauerwerken: mind. 168 cm

Wannenmaß innen: 55 cm bis 65 cm

Auflage Wannenrand: mind. 4 cm

Abstand Wannenoberkante und Unterkante Armaturen/Anbauten

(Mischbatterie, Wanneneinlauf, Badewannengriff, Seifenschale, etc.): mind. 11 cm

3.2.3 Typ C

Wannenmaß außen: 170 cm x 70 cm

Bei Einfassung zwischen zwei Mauerwerken:

Innenmaß zwischen den Mauerwerken: mind. 168 cm

Wannenmaß innen: 50 cm bis 60 cm

Auflage Wannenrand: mind. 4 cm Abstand

Wannenoberkante und Unterkante Armaturen/Anbauten

(Mischbatterie, Wanneneinlauf, Badewannengriff, Seifenschale, etc.): mind. 11 cm

Sondermaße auf Anfrage möglich!

3.3 Montage auf Wannenrand

Das Untergrundgestell der „bamed“ Dusch-und Waschliege zunächst auf den Wannenrand aufsetzen und mittig ausrichten (Abb. 1). Hierbei sollte darauf geachtet werden, dass die Längsseite mit Kantenschutz zur Wand gerichtet ist, um diese vor Kratzern zu schützen und um ggf. das Aufsetzen des Spritzschutzes auf das Untergrundgestell zu ermöglichen.

Die Dichtung unter dem Untergrundgestell besteht aus Moosgummi und verhindert neben der Funktion als Nässeschutz, ein Verrutschen der Liege sowie ein Zerkratzen der Wannenoberfläche.

Nach Ausrichtung des Untergrundgestells die Abstandshalter fest an die Innenseiten der Wanne drücken Die einzelnen Abstandshalter anschrauben und fixieren (Abb 2).

Nach Fixierung des Untergrundgestells auf dem Wannenrand die Liegeeinsätze auf bzw. in das Untergrundgestell einlegen (Abb. 3). Zur Verwendung der „baramed“ Dusch-und Waschliege sind die Liegeeinsätze ohne weitere Montage gebrauchsfertig. Die Liegeeinsätze sind an den gekennzeichneten Stellen (s. Aufkleber) zur Wannenmitte einzusetzen.

3.4 Montage Spritzschutz

Ggf. den Spritzschutz auf das Untergrundgestell aufsetzen. Die Nut des Spritzschutzes ist an der Innenseite leicht verkürzt, sodass der Spritzschutz zur Vereinfachung der Montage an das Untergrundgestell angelehnt und durch ein senkrechtes Kippen auf das Untergrundgestell aufgesetzt werden kann (Abb. 4).

4. Materialien

Das Untergrundgestell, die Liegeeinsätze sowie der Spritzschutz der „baramed“ Dusch-und Waschliege bestehen aus pulverbeschichtetem/lackiertem Aluminium. Sämtliche Schraubverbindungen sind aus rostfreiem Edelstahl gefertigt. Das für den Bezug der Lamellen und für das Kissen verwendete Textilgewebe besteht aus besonders weichem Mikrofaser (Oberfläche: 100% Polyamide, Grundgewebe: 65% Polyester / 35 % Baumwolle, Polyurethan Beschichtung) und wurde auf folgende Proben untersucht:

1. Wasserdichtheit

BS 3424 Wassersäule > 1 m

2. Scheuerfestigkeit

BS EN ISO12947-2: > 100.000 Martindale Scheuertouren

3. Pilling

EN ISO 12945-2: 4-5

4. Lichtechtheit

DIN EN ISO 20105-802: 5

5. Reibechtheit

DIN EN ISO 20105-X12: trocken: 4-5, nass: 4-5

6. Feuerbeständigkeit

EN 1021/1 BS 5852 source O: Zigarette, EN 1021/2 BS 5852 source 1: Streichholz BS 5852 section 4: Ignition source Crib 5, BS 7176: Medium Hazard

7. Urinbeständigkeit

BS 3424 Teil 19: kein Effekt nach 24 St. In 5.5 pH & 8.8 pH

8. Anti-bakterielle Wirkung

AA TTC 14 7 -1998: keine Entwicklung von Bakterien

9. Schadstoff-Prüfung

Das Muster erfüllt die Anforderungen der Europäische Chemikalienverordnung REACH (EG) 1907/2006 S

5. Reinigung und Wartung

Das Untergrundgestell, der Spritzschutz und die textilumfassten Lamellen sowie das Kissen der „bamed“ Dusch-und Waschliege können durch den Patienten selbst mit haushalts- und handelsüblichen Desinfektionsmitteln und Methoden gereinigt werden. Die Desinfektionsmittel dürfen einen Alkoholgehalt von 10% nicht übersteigen. Der Einsatz von Chlorbleichmitteln wird nicht empfohlen.

Die „bamed“ Dusch-und Waschliege ist grundsätzlich wartungsfrei.

Überprüfen Sie jedoch regelmäßig die Liege (Bezug) und das Untergestell auf Risse, Brüche, lockere oder verlorene Teile, insbesondere der Abstandshalter, sowie auf sonstige Funktionsstörungen. Bitte nehmen Sie die Liege nicht mehr in laufenden Betrieb, sofern Sie einen solchen Mangel feststellen und kontaktieren Sie den Hersteller.

6. Technische Daten

Typ A Wannenmaß: 180 cm x 80 cm

Maße in mm	Untergrundgestell	Liegeeinsetzung (2x)	Spritzschutz	Kissen
Länge	1770 mm	885 mm	1770 mm	560 mm
Breite	800 mm	800 mm	50 mm inkl. Griffhalterung	190 mm
Höhe	70 mm	120 mm inkl.Aufpolsterung	305 mm	95 mm
Gewicht	7 kg	9,5 kg	6 kg	0,8 kg
Max. Belastung	---	150 kg	---	---

Typ B Wannenmaß: 170 cm x 75 cm

Maße in mm	Untergrundgestell	Liegeeinsetzung (2x)	Spritzschutz	Kissen
Länge	1670 mm	835 mm	1670 mm	560 mm
Breite	750 mm	750 mm	50 mm inkl. Griffhalterung	190 mm
Höhe	70 mm	120 mm inkl.Aufpolsterung	305 mm	95 mm
Gewicht	6,7 kg	8 kg	5,7 kg	0,8 kg
Max. Belastung	---	150 kg	---	---

Typ C Wannenmaß: 170 cm x 70 cm

Maße in mm	Untergrundgestell	Liegeeinsetzung (2x)	Spritzschutz	Kissen
Länge	1670 mm	835 mm	1670 mm	560 mm
Breite	700 mm	700 mm	50 mm inkl. Griffhalterung	190 mm
Höhe	70 mm	120 mm inkl.Aufpolsterung	305 mm	95 mm
Gewicht	6,5 kg	6,5 kg	5 kg	0,8 kg
Max. Belastung	---	150 kg	---	---

7. abschließende Hinweise

7.1 Nutzungsdauer

Bei sachgemäßer Nutzung wird eine Nutzungsdauer von mind. 10 Jahren prognostiziert.

7.2 Wiedereinsatz Dusch-und Waschliege

Sämtliche Bauteile der „baramed“ Dusch-und Waschliege können jederzeit auf anderen Badewannen gemäß den Spezifikationen unter Punkt 3.2 wiederverwendet werden.

Hierzu lösen Sie bitte nach Entnahme der Liegeeinsätze die Abstandshalter, um das Untergrundgestell vom Wannenrand abheben zu können.

Bei Transport ist auf eine ordnungsgemäße Verpackung zu achten, um die „baramed“ Dusch-und Waschliege vor Schäden, insbesondere vor Rissen, Brüchen und Verbiegungen, zu schützen. Ggf. bewahren Sie bitte die Originalverpackung für einen späteren Transport auf.

7.3 Ersatzteile und Einzelteilbestellung

Für eine Ersatzteil-und Einzelteilebestellung wenden Sie sich bitte direkt an den Hersteller.

7.4 Garantieleistungen

Auf die „baramed“ Dusch-und Waschliege wird eine Garantie von 2 Jahren ab Kaufdatum gewährt. Die Mängelhaftung umfasst sämtliche Ausführungen, die nachweislich durch einen Material-oder Herstellungsfehler verursacht worden sind.

Offensichtliche Mängel sind spätestens innerhalb einer Woche nach Empfang der Ware schriftlich anzuzeigen, ansonsten gilt die Ware als angenommen. Bei Transportschäden ist ggf. der Spediteur zur Schadenfeststellung heranzuziehen.

Schäden, die aus einer unsachgemäßen Nutzung, einer übermäßigen Beanspruchung sowie aus nachlässiger oder unrichtiger Beanspruchung und gewaltsamen Beschädigungen herrühren, werden von der Garantieleistung nicht erfasst. Die Garantieleistung wird ebenfalls durch Änderungs-und Instandsetzungsarbeiten, die ohne schriftliche Genehmigung des Herstellers vorgenommen werden, außer Kraft gesetzt.

Weitergehende Schadenersatzansprüche des Käufers oder von Dritten, insbesondere Schäden, die nicht am gelieferten Produkt selbst entstanden sind, werden ausgeschlossen.

Der Hersteller behält sich vor, während der Garantiezeit schadhafte oder unbrauchbar gewordene Teile am Produkt innerhalb einer angemessenen Frist unentgeltlich auszubessern oder auszutauschen. Im Fall einer technischen Änderung des Produktes behält sich der Hersteller vor, das schadhafte oder unbrauchbar gewordene Produkt gegen ein technisch gleichwertiges Produkt auszutauschen.

7.5 Konformitätserklärung



Hiermit erklärt der Hersteller die Konformität dieses Produktes mit der EG-Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte

Herstellung und Vertrieb:

TheraMedical GmbH
Bahnhofstraße 1A
69151 Neckargemünd

Tel.: 0049(0)6223-862052
Fax: 0049(0)6223-862051
email: info@theramedical.de